

Nach Verwendung den Sprühkopf trocken, mit einem frischen Papiertaschentuch säubern und Schutzkappe wieder aufsetzen.

Aus hygienischen Gründen sowie zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern wird empfohlen, dass LUUF® Mare Nasenspray nur von jeweils einer Person verwendet wird.

Schwangerschaft und Stillperiode:

Die Anwendung von LUUF® Mare Nasenspray während der Schwangerschaft und in der Stillperiode kann ohne Bedenken empfohlen werden.

Hinweise zur Haltbarkeit:

Nach Erstgebrauch nicht länger als 6 Wochen verwenden. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Stand der Information: Mai 2010

Hersteller: MPC International S.A., 2449 Luxemburg

Vertrieb: APOMEDICA, 8010 Graz, Austria

282.03/5



GEBRAUCHSINFORMATION

bitte aufmerksam lesen

Zusammensetzung:

Isotone Lösung mit hochwertigem Meervollsalz aus dem Atlantik in reinem destillierten Wasser

Packungsgröße: 20 ml

Hinweis:

Medizinprodukt ohne Konservierungsmittel und Treibgas

Anwendungsgebiete:

LUUF® Mare Nasenspray mit Meervollsalz wird zur Befeuchtung und Reinigung der Nasenschleimhäute eingesetzt und wirkt so einem Austrocknen der Nase entgegen. Darüber hinaus wird durch das Aufweichen eingetrockneten Nasensekrets die Selbstreinigungskraft der betroffenen Schleimhäute wirkungsvoll unterstützt. LUUF® Mare Nasenspray kann auch zur Unterstützung der Behandlung von Schnupfen und verstopfter Nase eingesetzt werden.

Die Nase ist ein hochsensibles Sinnesorgan, das mit einer besonderen Schleimhaut ausgekleidet ist. Darin befindliche Abwehrzellen sowie aufgelagerte Flimmer-

härchen sorgen für Schutz vor Krankheitserregern sowie Staub- und Schmutzpartikeln. Voraussetzung dafür ist ein ausreichend hoher Feuchtigkeitsgehalt der Nasenschleimhaut.

Geringe Luftfeuchtigkeit in geheizten oder klimatisierten Räumen, erhöhte Luftbelastung durch Blütenpollen oder Staub sowie aktiver und passiver Nikotinkonsum führen zu einem Austrocknen der Schleimhäute in Nase und Rachen. Dieses Gefühl der Trockenheit wird von vielen als unangenehm empfunden.

LUUF® Mare Nasenspray gibt der Nase die nötige Feuchtigkeit, erleichtert die Reinigung und wirkt durch die natürlichen, im Meersalz enthaltenen Mineralstoffe unterstützend bei der Schleimhaut-Regeneration. Dadurch wird das Wohlbefinden nachhaltig verbessert.

Besonderheiten:

Durch die Verwendung eines nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen konzipierten Feinsprühsystems wird gewährleistet, dass der Inhalt von LUUF® Mare Nasenspray gegenüber Verunreinigungen durch Mikroorganismen etc. geschützt ist.

Daher enthält LUUF® Mare Nasenspray keine Konservierungsmittel, wodurch ein unnötiges Allergierisiko vermieden wird.

LUUF® Mare Nasenspray wird Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren empfohlen.

Für Säuglinge und Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr steht Baby LUUF® Mare Nasenspray mit einem entsprechend reduzierten Sprühvolumen zur Verfügung.

Anleitung zu Dosierung und Anwendung:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen (1 Sprühstoß = 0,14 ml).

LUUF® Mare Nasenspray kann ohne Bedenken über einen längeren Zeitraum angewandt werden.

Wenn sich die Beschwerden trotz regelmäßiger Anwendung von LUUF® Mare Nasenspray nach 1 - 2 Wochen nicht bessern, sollte Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker gehalten werden.



Abb. 1



Abb. 2

Schutzkappe abnehmen. Vor erstmaligem Gebrauch die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und die Pumpe mehrmals betätigen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht (1). Damit ist der Nasenspray gebrauchsfertig.

Sprühöffnung senkrecht in jede Nasenöffnung einführen und die Pumpe betätigen (2).