

# Mare Nasen- spray

- Isotone Meersalzlösung
- Mit Meersalz und gereinigtem Wasser

**Zusammensetzung:**

Isotone Meersalzlösung, die Meersalz und gereinigtes Wasser enthält.

**Verpackungsgröße:**

Inhalt: 20 ml  
Ein Sprühstoß entspricht 0,07 ml

**Hinweis:**

Medizinprodukt ohne Konservierungsmittel und Treibgas

**Anwendungsgebiete**

Zur Befeuchtung der Nase z.B. bei trockener Raumluft durch Heizung oder Klimatisierung.  
Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei erhöhter Belastung durch Staub, Pollen oder Rauch.  
Zur unterstützenden Behandlung von Erkältungen (Schnupfen und verstopfter Nase).

Baby LUUF<sup>®</sup> Mare Nasenspray enthält reines Meersalz, dessen Salzgehalt an das optimale Niveau für den menschlichen Körper (Isotonisierung) angepasst wurde. Baby LUUF<sup>®</sup> Mare Nasenspray ist daher sehr gut verträglich. Die Schleimhäute werden nicht gereizt. Wertvolle Mineralien (Magnesium, Kalzium) bleiben bei der Aufbereitung des Meerwassers erhalten.

**Wirkungsmechanismus**

Natürliches Meerwasser reinigt und spendet Feuchtigkeit für die verstopfte und trockene Nase. Eine Befeuchtung der Nasenschleimhaut verhindert die Austrocknung der Nase. Die Nase wird gereinigt und ihre Funktionalität als wichtiges Atmungsorgan und als Filter der Atemluft (filtert Staub, Keime, Pollen) wird dadurch unterstützt.

**Dosierung und Art der Anwendung**

Je nach Bedarf 1 Sprühstoß Baby LUUF<sup>®</sup> Mare Nasenspray in jedes Nasenloch einsprühen.  
Baby LUUF<sup>®</sup> Mare Nasenspray sollte nicht länger als 30 Tage kontinuierlich angewendet werden.

**Gegenanzeigen**

Es gibt keine bekannten Gegenanzeigen.

**Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

## Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

## Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine besonderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung von Baby LUUF® Mare Nasenspray erforderlich.

## Anwendung

1) Entfernen Sie den Verschluss und nehmen Sie dann die Sprühflasche in eine Hand. Entfernen Sie die Schutzkappe und drücken Sie den oberen Teil der Pumpe bis zum ersten Sprühstoß mehrmals nach unten. Die Flasche sollte während der Vorbereitung auf den Gebrauch senkrecht gehalten werden.

2) Mehrmals täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch einsprühen. Säuglingen und Kleinkindern kann Baby LUUF® Mare Nasenspray am besten in sitzender Haltung verabreicht werden. Sprühöffnung senkrecht in jede Nasenöffnung einführen und dabei die Pumpe betätigen. Aus hygienischen Gründen sollten Sie die Pumpe nach jedem Gebrauch abwischen und das Produkt nicht mit anderen Personen teilen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## Hinweise zur Haltbarkeit

Das Spray kann nach der ersten Anwendung für 12 Monate verwendet werden.

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information 2018-06



Abb. 1



Abb. 2



**Hersteller:** HÄLSA Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5, D-23562 Lübeck

**Vertrieb:** APOMEDICA, 8010 Graz, Austria



STERILE A

CE 0482